




NÄIN PUET TUTKIMUS- JA SUOJAKÄSINEEN



1. Pese ja kuivaa kädet huolellisesti ennen kuin otat käsineen pakkauksesta.

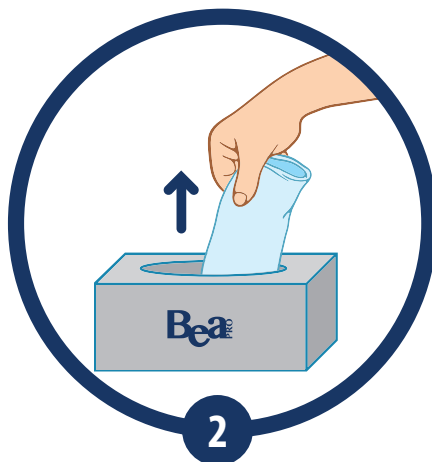

2. Ota yksi käsine ulos pakkauksesta kevyesti vetämällä.



3. Tarkista ennen käyttöä, ettei käsineissä ole vikoja.



4. Pue ensin käsine hallitsevaan käteesi ja yritä välttää koskemaasta työskentelypintaan.



5. Laita seuraavaksi käsine toiseen käteesi käyttämällä hallitsevaa kättäsi, johon olet jo pukeutunut käsineen.



6. Kun molemmat käsineet on puettu, säädä käsineiden istuvuutta. Varmista venyttämällä, että käsineet istuvat hyvin sormenpäitä vasten ja ranteet ovat peitettyinä.




NÄIN RIISUT TUTKIMUS- JA SUOJAKÄSINEEN



1. Aloita pitämällä kiinni toisen käden sormella hallitsevan kätesi käsineen mansetista.



2. Vedä käsine varovasti nurinpäin pois koskettamatta käsineen ulkopintaa.

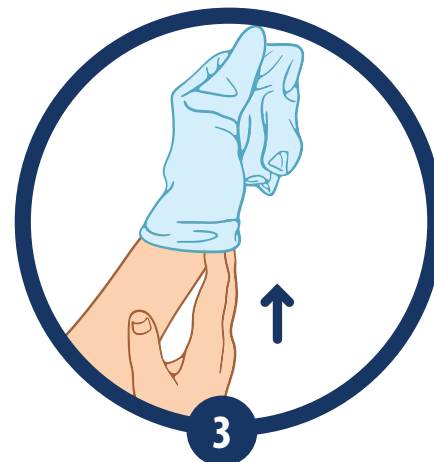

3. Seuraavaksi vedä toinen käsine varovasti nurinpäin samalla tavalla koskettamalla vain käsineen sisäpintaa.



4. Hävitä käsineet paikallisten määräysten mukaisesti.